



의약품직접주입기구

Nexvein

(IV-210403 외 3건)

[사용방법]

1. 사용 전의 주의사항

- 1) 제품 포장에 이상이 없는지 확인하고, 손상이 없을 경우 제품을 개봉한다.
- 2) 개봉한 제품의 상태(이물 여부, 니들 손상 여부 등)에 이상이 없음을 확인하고, 클램프가 잠겨 있지 않고 통기 커넥터가 잠겨 있는지 확인한다.
- 3) 제품 포장 또는 개봉한 제품의 상태에 이상이 있는 제품은 사용하지 않는다.

2. 조작 방법

- 1) 니들에 손상을 주지 않도록 주의하여 보호관(Needle sleeve)을 제거한다.
- 2) 한 손으로 카테터 베이스를 잡은 상태에서 다른 손으로 니들 홀더를 잡고 살짝 돌려봄으로써, 니들이 잘 움직이는 것을 확인하고 원위치 시킨다.
- 3) 낮은 각도로 혈관에 삽입하고, 카테터로 혈액이 역류됨을 확인한다.
- 4) 카테터를 혈관 내로 삽입시킨 후, 한 손으로 카테터 베이스를 잡아 고정하면서 다른 손으로 니들 홀더를 당겨 니들을 제거한다. 이 때, 카테터 손상을 방지하기 위해 니들을 다시 넣지 않도록 주의하여야 한다.
- 5) 제거한 니들은 정해진 용기에 버리고, 카테터가 고정될 수 있도록 드레싱을 한다.
- 6) 클램프를 잠그고 통기 커넥터를 제거한 후, 약물 주입 세트와 연결한다.

3. 사용 후의 보관 및 관리방법

- 1) 일회용 의료기기로 재사용을 금지한다.
- 2) 사용된 제품은 규정된 폐기 절차에 의해 폐기 처분되어야 한다.

[사용 시 주의 사항]

1. 경고

- 1) 멸균 의료기기로 제품 포장이 손상된 경우 사용해선 안 된다.
- 2) 일회용 의료기기로 재사용 또는 재멸균하지 않는다.

2. 일반적 주의 사항

- 1) 개봉 후 즉시 사용하며, 보호관(Needle sleeve)은 사용 직전 제거한다.
- 2) 사용 전 제품 외관을 확인하고, 이상이 없는 제품을 사용한다.
- 3) 유효기간(제조일로부터 3년)이 지난 의료기기는 사용하지 않는다.
- 4) 카테터를 혈관 내로 삽입시킨 후 니들 제거 시, 니들을 혈관 방향으로 다시 놓지 않도록 주의한다.
- 5) 실린지 등의 다른 의약품주입기구와 연결하여 사용 시, 루어(6%)락 커넥터의 제품을 사용한다.
- 6) 12시간 이상 장시간 약물 주입 목적으로 사용 시, 적량의 노말셀라인을 사용하여 최소 12시간 간격으로 카테터를 세척함으로써 니들이 막히지 않도록 한다.
- 7) 사용 중 누출 발생 시 즉시 사용을 중단하고 새 제품으로 교체한다.

3. 적용상의 주의 사항

- 1) 적절한 교육을 이수한 의료전문가에 의해서만 사용되도록 하며, 사용 전 사용 설명서를 숙지한다.
- 2) 본 의료기기는 지용성 약물 주입 목적으로는 적절하지 않다.

[수입업자]

상호: 엔코맥(주)

홈페이지: www.encormac.com

주소: 서울특별시 마포구 월드컵로 32길 19, 7층(성산동, 보양사옥빌딩)

[제조원]

상호명: Shenzhen Antmed Co., Ltd.

주소: 46 Keji Ave., Yuquan Industrial Park, Fenggang, Dongguan, Guangdong, 523696, China

[인증번호]

수인 22-4334 호

[명칭]

제품명) Nexvein

품목명) 의약품직접주입기구

모델명) IV210403, IV210303, IV210203, IV210103

[사용기한]

제조일로부터 3년

[중량 및 포장단위]

1개

["의료기기", "일회용", "재사용 금지", 멸균제품(산화에틸렌멸균)]

[사용목적]

기타 의약품을 주입하는 데에 사용하는 기구로서 의약품의 직접 접촉되는 주입용 기구

[보관 및 저장방법]

서늘하고 건조한 실온에 보관한다.

[첨부분서의 작성연월]

2022.07.01.